

Boîte de lingettes nettoyantes désinfectantes

DAV15970

Boîte de 100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-invasifs.



Conditionnement

Format de lingette : 130 x 200mm

Boîte de 100 lingettes

Actifs

Ethanol, Isopropanol, Chlorure de benzalkonium, Trideceth –7.

Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348 et EN14563 en 15mn*
- Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624* en 5 min.
- Virucide* EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus en 1 min, Rotavirus en 15mn.

Mode d'emploi

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Bien refermer le couvercle après utilisation.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.

Précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



0459

DAV15970